

„Supra-Pflege”


Használati utasítás

Tisztító és fertőtlenítőszer

Supratex és Suprasoft fedőrétegű védőöltözékekhez

Kiszerelés:

500 ml / flakon

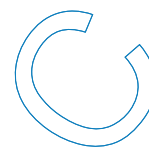

Kémiai összetétel, 100 g tartalmaz:

Didecyldimethylammoniumchlorid

0,25 g

Alkylbenzoldimethylammoniumchlorid

0,25 g

Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g

Használati információk:

Felületi fertőtlenítő a védőruhák gyors fertőtlenítéséhez mindennapos használatra a gyógyászat területén.

Alkalmazás:

A permittel teljesen nedvesítse be a szennyezett területet, majd enyhe nyomással törölje le a szennyezést egy ronggyal!

Reakcióidő:

Bakterizid inkl. MRSA, fungizid:


konz. 1 min.

BVDV*/Vaccina*/Rota-Viren:

konz. 1 min.

Papova-Viren:

konz. 5 min.

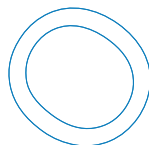

Általános információk:

Erősen szennyezett és már beszáradt foltokat (pl.vérfolt) az anyagból nem távolít el. Ezért a vérfoltot a kötényekből a használat után azonnal ki kell tisztítani! Ez történhet langyos víz és nem agresszív tisztítószer használatával, de ez az eljárás nem fertőtleníti a védőruhát.

DGHM / VAH
által listázott

